



Dr. weigert merupakan salah satu pruduk No. 1 di dunia yang terkenal dengan cairan cairan diterjen yang berkualitas tinggi di dalam pencucian intrumen. Dr. Weigert memiliki berbagai macam jenis dalam konsep pencucian sesuai dengan jenis instrument dan kebutuhannya.

Dalam konsepnya dr. weigert membagi jenis penggunaan cairan dalam 3 jenis yang diantaranya adalah :

- Produk untuk pencucian secara manual
- Produk untuk pencucian secara otomatis menggunakan mesin washer disinfector
- Produk untuk perawatan instrument bedah

## Contact Us

PT. Royal Medpro,  
6th Floor Menara Rajawali, Jl. DR. Ide Anak Gde Agung Lot. #5.1, Kawasan Mega  
kuningan, Jakarta 12950 Indonesia  
Telepon : 021  
[www.royalmedpro.com](http://www.royalmedpro.com)



# Konsep menggunakan cairan diterjen dengan produk Dr. Weigert




**PT. ROYAL MEDPRO**

Jakarta, 1 Januari 2015

# Pencucian dengan automatic menggunakan mesin washer disinfector

Cairan detergen Septo Preclean di lakukan sebelum dimasukkannya material ke mesin washer dan setelah itu proses pada grafik di bawah ini di jalankan :

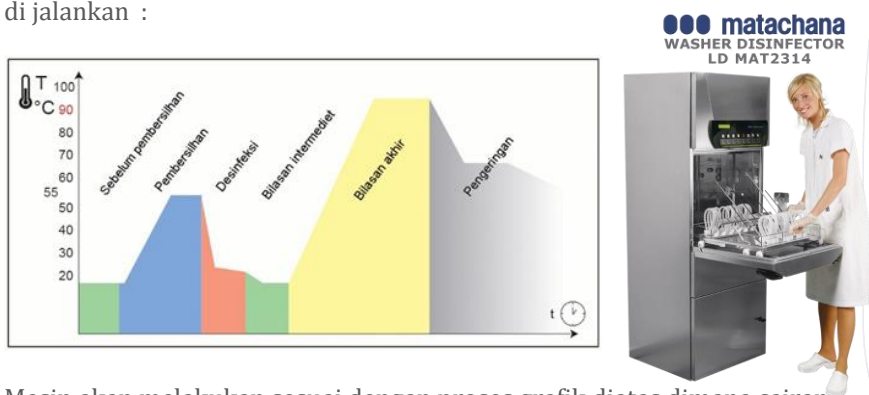

Mesin akan melakukan sesuai dengan proses grafik diatas dimana cairan detergen dan cairan pembilasan disediakan pada 2 tempat yang terdapat pada mesin, terdapat dua pilihan dalam menentukan detergen pada produk Dr. Weigert gunakan mediclean forte dan jika anda khusus mencuci seperti botol bayi maka dianjurkan menggunakan produk Neodisher FA dengan kandungan alkaline namun tidak mengandung surfaktan.

*Pencucian dengan mesin washer disinfector akan sangat irit tenaga dan terukur ketika menggunakan cairan detergen karena mesin menjalankannya dengan program.*

## Cairan untuk mesin washer disinfektor

### DITERGEN : Mediclean Forte



Merupakan cairan universal detergen dengan kandungan alkaline, Surfaktan dan enzyme yang khusus untuk produk mesin washer disinfector.

### DITERGEN : Neodisher FA



Merupakan cairan detergen untuk material seperti botol susu yang hanya mengandung Alkaline. Detergen ini tidak mengandung surfaktan dan oksidasi adiktif.


### Pembilasan & Netralisir : Mediklar Spesial



Merupakan cairan untuk pembilasan agar air cepat kering dan juga berfungsi sebagai penetralisir dari acid.

## Pencucian secara manual dengan meja pencucian

Langkah pada pencucian manual terdapat pada gambar di bawah ini :

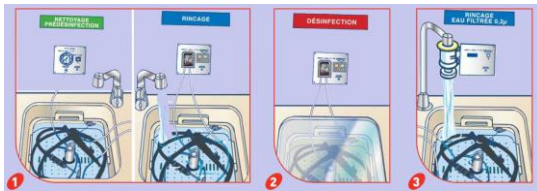

Pencucian dengan manual ini sangat dibutuhkan terutama pada saat melaksanakan pembersihan awal dan ketika akan melakukan pencucian dengan detergen. Oleh karena itu produk Dr. Weigert menyediakan jenis jenis kandungan yang sesuai dengan material instrument bedah. Namun hal yang paling terpenting adalah mengikuti procedure dari aturan pakai yang sudah di referensikan oleh Dr. Weigert seperti jenis air, suhu air, dan kadar cairan.

Adapun mengikuti langkah langkah dalam pencucian maka Dr. Weigert menyediakan produk sesuai dengan konsep yang anda inginkan diantaranya adalah :

- Detergen untuk *Pre Cleaning* dengan menggunakan Septo Pre Clean
- Detergen untuk pencucian dengan 2 pilihan *Enzyme* dan *Alkaline*
- Disinfektan tingkat tinggi dengan merendam menggunakan Septo 3000

Masing masing dari produk ini harus dibaca master data sheet nya agar penggunaanya sesuai dengan khasiatnya.

## Cairan untuk pencucian manual

### Pre Clean : Septo PreClean



Ditergen untuk pencucian instrument bedah, dental instrument, flexible endoscope sebelum diproses ke mesin washer disinfector atau pencucian secara manual dan sangat cocok untuk instrument yang terbuat dari bahan yang labil.

### Detergen : MultiZym(Enzyme)



Detergen enzymatic ini mengandung 3 unsur, Protase, Lipase dan Amilase, dimana fungsinya adalah protase untuk menghilangkan protein dari darah yang menempel pada instrument, lipase untuk menghilangkan lemak, amylase untuk menghilangkan polisakarida atau lendir dari bronkus. \*Tersedia botol 5 liter dan 1 liter.

### Detergen : Neodisher LM2



Detergen dengan kandungan Alkaline yang lembut dan kandungan surfaktan yang rendah, dapat digunakan pada instrument bedah dan dental instrument.

### Disinfektan : Septo 3000



Disinfektan secara manual baik instruemn bedah yang tidak tahan panas maupun yang tahan panas cepat kering dan juga berfungsi sebagai penetralisir dari acid.

## Produk untuk perawatan Instrument bedah

Dalam produk Dr. Weigert, konsep ini adalah untuk mencegah rusaknya instrument bedah yang diantaranya adalah seperti hal dibawah ini :

1. Instrument bedah yang kotor dari ruang operasi biasanya di diamkan sebelum melakukan pencucian karna itu produk **Neodisher PreStop** dapat disemprotkan pada material lalu di letakkan pada wadahnya maka instrument tersebut akan terlindungi dari kontamiasi darah dan kotoran dalam waktu yang lama selama 24 Jam lebih.
2. Ketika material instrument bedah terlihat sudah kuning dan berkarat maka produk **Neodisher IR** berkhasiat untuk menghilangkan dari karat tersebut, yang dapat digunakan pada meja pencucian manual dan Mesin Ultrasonic.
3. **Neodisher IP Spray** adalah produk untuk pemberian minyak ketika instrument bedah sudah melalui pencucian dan sudah kering, adapun IP Spray disemprotkan pada material seperti gunting gunting yang mempunyai engsel.
4. **Triformin Care** merupakan produk untuk perawatan kulit pada tangan ketika terkontaminasi cairan cairan ditergen sehingga berkhasiat untuk melembabkan kulit.

Anda dapat juga mendapatkan informasi penuh dari setiap produk Dr. Weigert melalui website di [WWW.DRWEIGERT.COM](http://WWW.DRWEIGERT.COM)

## Produk perawatan untuk Instrument Bedah dll.

### Neodisher PreStop



Produk dalam bentuk spray yang disemprotkan pada instrument bedah setelah digunakan untuk operasi agar mencegah instrument berkarat yang disebabkan oleh residu larutan garam.

### Neodisher IR



Untuk pembersihan awal instrumen bedah stainless steel baik di bak atau ultrasonic. Ditergen ini berfungsi untuk menghilangkan karat pada instrument.

### Neodisher IP Spray



Penyemprotan minyak pada instrument untuk perawatan seperti gunting dan instrument yang lain yang mempunyai engsel.

### TriforminCare



Krim untuk perawatan kulit karna efek dari cairan ditergen pencucian instrument.

### AUTOMATIC WASH

Produk & Komposisi	Info Produk
<b>Neodisher MediClean Forte</b> <i>Kandungan : Alakaline, Enzymatik dan Surfaktan</i>	Dapat digunakan pada instrument bedah, container almunium, anastesi, flexible endoscope, system motor dengan body almunium.
<b>Neodisher FA</b> <i>Kandungan : Alkaline, bebas dari surfaktan dan bebas dari cairan oksidasi</i>	Dapat digunakan untuk botol susu bayi, peralatan anastesi, sepatu ruang operasi dan barang pecah belah pada laboratorium.
<b>Neodisher Mediklar Spesial</b> <i>Kandungan : Rinse aid dan penetralisir</i>	Untuk pengeringan yang cepat dan termasuk membebaskan residu selama pemrosesan otomatis instrumen bedah, Instrumen oftalmologi, peralatan anastesi, wadah intrument, implan serta botol bayi. Menetralkan residu yang dibawa alkali dan mengurangi pembentukan noda bila menggunakan air yang lunak dalam siklus bilasan akhir.

### MANUAL WASH

Produk & Komposisi	Info Produk
<b>Neodisher Septo PreClean</b> <i>Kandungan: Cleaning, Disinfecting, free-aldehyde. Non ionic surfaktan, amphoteric surfaktan, Disinfektan dengan Laurilpropelindia-mine</i>	Dapat digunakan untuk instrument bedah dan dental instrument, yang sudah direndam lama dari ruang oprasi. Cocok untuk peralatan seperti : almunium, metal yang tidak mengandung besi, plastic dan silicon.
<b>Neodisher MultiZym</b> <i>Kandungan : Manual deterjen Multi-enzimatik, bebas dari borat, bebas dari parfum dan pewarna, surfaktan dan enzim</i>	Dapat digunakan pada instrument bedah stainless stell, Optik, Standart material sintetik, almunium, silicon dan peralatan anastesi.
<b>Neodisher LM2</b> <i>Kandungan : Manual, mildly alkaline, surfactants.</i>	Sangat cepat membersihkan dan Bebas dari busa yang mengganggu, menghilangkan residu organik yang berlapiskan darah, protein dan juga bekas makanan, Semen dental, Atau material dari penelitian hewan, tidak cocok untuk alat gelas, keramik, baja kelas tinggi,
<b>Neodisher Septo 3000</b> <i>Kandungan :</i>	Dengan kandungan aldehydes-bactericidal, fungicidal, mycobactericidal, virucidal, sporicidal, tuberculocidal, yeasticidal, active against enveloped viruses (incl. HIV, HBV, HCV)

### MAINTENANCE TREATMENT

Produk & Komposisi	Info Produk
<b>Neodisher PreStop</b> <i>Kandungan : menghambat pertumbuhan mikro organisme di instrument selama terkena cairan.</i>	mencegah korosi pitting pada stainless instrumen baja disebabkan oleh residu larutan garam, setelah penggunaan dapat disimpan dalam kontener tertutup sampai diatas 24 jam, dan tidak perlu dibilas jika ingin di masukkan ke dalam mesin washer.
<b>Neodisher IR</b> <i>Kandungan : Digunakan pada baka atau ultrasonic cleaner</i>	Menghilangkan karat pada instrument stainlessstell secara otomatis ketika di rendam sesuai petunjuk data sheet.
<b>Neodisher IP Spray</b> <i>Kandungan : Non ionic surfakatan, aliphatic hydrocarbons, solvents, propellant gas</i>	Untuk pelumasan manual instrumen berengsel setelah pencucian, cocok untuk mesin sterilisasi uap(steam) namun tidak cocok untuk digunakan pada sterilisasi kering (udara panas)
<b>TriforminCare</b> <i>Kandungan : Mencegah iritasi kulit yang disebabkan karna ditergen.</i>	Sebelum digunakan cuci tangan dan keringkan, dapat digunakan untuk melindungi kulit tangan sebelum dan sesudah melakukan pencucian.,